

ITALIANO ISTRUZIONI PER L'USO

I. Introduzione

KATANA Zirconia è disponibile in 2 forme: Block e Disc. Le presenti IFU sono per KATANA Zirconia ST (Super Translucent) & STML (Super Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia ST e STML sono dischi pre-sinterizzati di ossido di zirconio di 98,5 mm di diametro, progettati per tutti i sistemi di fresatura che utilizzano questo tipo di disco. (Si prega di fare riferimento alle istruzioni tecniche del vostro sistema di fresatura per un utilizzo corretto della macchina.) KATANA Zirconia ST è disponibile in 3 spessori (14 mm, 18 mm e 22 mm) e ha 5 varianti di tonalità: (ST10), KATANA Zirconia STML è disponibile in 3 spessori (14 mm, 18 mm e 22 mm) e ha 5 varianti di tonalità: (A1, A2, A3, A3.5, NW). KATANA Zirconia ST è monocolor e KATANA Zirconia STML è costituito da 4 strati a tonalità graduale. KATANA Zirconia ST e STML sono raccomandati per la realizzazione di restauri in FCZ (Full Contour Zirconia) o per la realizzazione di strutture.

II. Uso previsto

KATANA Zirconia si usa per realizzare restauri in ceramica integrale (strutture, corone FCZ, ponti FCZ, inlay, onlay e faccette).

III. Programma di sinterizzazione

Temperatura	Rapporto di programmazione	Tempo di mantenimento	10 °C/min. (18 °F/min.)	1550 °C (2822 °F)	-10 °C/min. (-18 °F/min.)
Temperatura ambiente	10 °C/min. (18 °F/min.)	—		Mantenere per 2 ore	
1550 °C (2822 °F)	—	2 ore			
1550 °C (2822 °F)	-10 °C/min. (-18 °F/min.)	—			
— Temperatura ambiente			Temperatura ambiente		Temperatura ambiente

IV. Composizione

ZrO₂, Y₂O₃ ecc.

V. Tipo e classe (ISO6872:2008)

Tipo: II/Klasse:5

VI. Proprietà fisiche

Coefficiente di espansione termica (25-500 °C (77-932 °F)): 9,8(±0,2)×10⁻⁶/K

VII. Istruzioni per l'uso

- Togliere il disco dalla confezione e assicurarsi che il disco non presenta crepe o sia in altro modo danneggiato.
- Collocare il disco all'interno della fresatrice; avviare quindi il processo di fresatura seguendo le istruzioni tecniche del sistema di fresatura.
- Dopo la fresatura, rimuovere dal disco i restauri con una fresa diamantata ecc.
- Gli sfondi del taglio o la polvere che rimane attaccata ai restauri si possono rimuovere con un getto d'aria delicato.
- Mettere i restauri nell'incasellatore refrattario e inserirli nel forno di sinterizzazione.
- Sinterizzare i restauri secondo la tabella di sinterizzazione sotto riportata (III. Programma di sinterizzazione).
- Dopo la sinterizzazione, rifinire i restauri con una fresa diamantata secondo necessità.
- Assicurarsi che i restauri non presentino crepe.

- Cottura del glaze: creare una superficie altamente brillante tramite la lucidatura, soprattutto nelle aree di contatto, poi applicare il glaze su tutte le superfici secondo il metodo abituale.
- Lucidatura manuale: creare una superficie altamente brillante sull'intero restauro tramite la lucidatura senza utilizzare il glaze. Quando si sta per terminare il restauro senza il glaze, selezionare una tinta più brillante rispetto alla tinta finale.
- Struttura: modellare la porcellana dentale (CERABIEN ZR o CZR PRESS LF ecc.) sulle strutture seguendo le istruzioni tecniche del produttore. Controllare il coefficiente di espansione termica della porcellana sulle istruzioni tecniche del produttore per verificare la compatibilità.

VIII. Note relative alla manipolazione

Controindicazioni:

- Se il paziente è ipersensibile all'ossido di zirconio o a qualsiasi altro componente, il presente prodotto non deve essere usato.

Attenzione:

- Se il paziente o il professionista del settore mostra una reazione di ipersensibilità come eruzione cutanea, dermatite ecc., sospendere l'uso del prodotto e richiedere immediatamente il parere di un medico.

DEUTSCH GEBRAUCHSINFORMATION

I. Einleitung

KATANA Zirconia ist in 2 Formen erhältlich: Block und Disc. Diese GA gilt für KATANA Zirconia ST (Super Translucent) und STML (Super Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia ST und STML sind vorgesinterte Zirkonoxid-Scheiben mit einem Durchmesser von 98,5 mm, die für alle Frässysteme geeignet sind die mit diesem Durchmesser arbeiten. (Bitte befolgen Sie die Anweisungen für den korrekten Gerätebetrieb in der technischen Anleitung Ihres Frässystems.) KATANA Zirconia ST ist in 3 Stärken (14 mm, 18 mm und 22 mm) und in 4 Farbvarianten (ST10) erhältlich. KATANA Zirconia STML ist in 3 Stärken (14 mm, 18 mm und 22 mm) und in 5 Farbvarianten (A1, A2, A3, A3.5, NW) erhältlich. KATANA Zirconia ST ist einfarbig, und KATANA Zirconia STML setzt sich aus 4 abgestuften Farbschichten zusammen. KATANA Zirconia ST und STML sind für den Einsatz bei der Herstellung von Restaurierungen aus FCZ (Full Contour Zirconia) oder Gerüsten empfohlen.

II. Bestimmungsgemäße Verwendung

KATANA Zirconia wird zur Herstellung volkeramischer Restaurierungen (Gerüste, FCZ-Kronen, FCZ-Brücken, Inlays, Onlays und Veneers) verwendet.

III. Sinterprogramm

Temperatur	Programmierungsraten	Haltezeit	10 °C/Min. (18 °F/Min.)	1550 °C (2822 °F)	-10 °C/Min. (-18 °F/Min.)
Raumtemperatur — 1550 °C (2822 °F)	10 °C/Min. (18 °F/Min.)	—			
1550 °C (2822 °F)	—	2 Stunden	Für 2 Stunden halten		
1550 °C (2822 °F) — Raum Temp.	-10 °C/Min. (-18 °F/Min.)	—			
			Raum Temp.		Raum Temp.

IV. Zusammensetzung

ZrO₂, Y₂O₃ ecc.

V. Typ und Klasse (ISO6872:2008)

Typ: II/Klasse:5

VI. Physikalische Eigenschaften

Wärmeausdehnungskoeffizient (25-500 °C (77-932 °F)): 9,8(±0,2)×10⁻⁶/K

VII. Gebrauchsanweisung

- Scheibe aus der Verpackung nehmen und sicherstellen, dass die Scheibe keine Risse oder anderen Schäden aufweist.
- Scheibe in die Fräsmaschine einlegen; dann mit dem Fräsvorprozess beginnen und dabei die für das Frässystem geltenden technischen Anweisungen befolgen.
- Nach dem Fräsen die Restaurierungen mit einem Diamantbohrer o. ä. von der Scheibe abtrennen.
- Der bei dem Schneiden entstandene Abfall oder Staub, der sich auf den Restaurierungen absetzt, kann mit einem sanften Luftstrom entfernt werden.
- Die Restaurierungen auf die feuerfeste Ablageplatte legen und in den Sinterofen geben.
- Die Restaurierungen unter Befolgeung des oben dargestellten Sinterplans sintern (III. Sinterprogramm).
- Nach dem Sintern nötigenfalls mit Hilfe eines Diamantbohrers die notwendigen Anpassungen der Restaurierungen vornehmen.
- Sicherstellen, dass die Restaurierungen keine Risse aufweisen.
- Gläsern: Die Oberfläche auf Hochglanz bearbeiten, besonders die Kontaktbereiche sollten hochglänzend sein, danach alle Oberflächen auf die übliche Weise gläsern.
- Polieren: Die gesamte Restaurierung auf Hand auf Hochglanz polieren ohne zu gläsern. Wenn die Restaurierung ohne Gläser fertiggestellt wird, sollte die Katana Zirconia STML Disk einen Farbton heller ausgesucht werden als die Zielfarbe.

- Gerüste: Das Dentalporzellan (CERABIEN ZR oder CZR PRESS LF etc.) auf den Gerüsten aufbauen und dabei die technischen Anweisungen des Herstellers befolgen. Den Wärmeausdehnungskoeffizienten des Porzellans gemäß den technischen Anweisungen des Herstellers überprüfen, um die Kompatibilität sicherzustellen.
- Anmerkungen zur Handhabung
- Gegenanzeigen:
- Wenn bei den Patienten eine Überempfindlichkeit gegen Zirkonoxid oder andere Komponenten vorliegt, darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Achtung:
- Wenn bei dem Patienten oder der zahntechnischen Fachkraft Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Ausschlag, Dermatitis usw., auftreten, die Nutzung des Produkts einstellen und sofort einen Arzt konsultieren.

2. Quando si fresa il disco o si taglia, leviga e lucida i restauri, usare una mascherina antipolvere e sottovoato con un filtro per l'aria per proteggere i polmoni dall'inhalazione della polvere.

3. Quando si fresa il disco o si taglia, leviga e lucida i restauri, usare occhiali protettivi per impedire alla polvere di entrare negli occhi. Se gli occhi vengono a contatto con la polvere, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e richiedere il parere di un medico.

4. Non usare il prodotto per scopi diversi dai restauri dentali. Il prodotto è esclusivamente destinato all'applicazione dentale.

5. Non toccare a mani nude gli oggetti riscaldati con il forno.

6. Non usare questo prodotto per realizzare ponti a 4+ elementi o ponti con elementi in estensione.

7. Questo prodotto è particolarmente traslucido; si dovrebbe pertanto considerare attentamente la sua appropriatezza di utilizzo per mascherare la superficie sottostante, come un abutment di metallo, o una preparazione dentale molto scura o scolorita.

8. I margini dovranno essere preparati con un chamfer profondo e spalle arrotondate, con spigoli vivi e angoli arrotondati di preparazione affilati. L'angolo della superficie assiale dovrà essere compreso in un intervallo da 5 a 15 gradi.

9. Durante la preparazione del dente, evitare quanto segue: spalle profonde, margini a J, bordi a lama di coltello, margini serrati, abutment non conici, sottosquadri, scanalature di guida, la formazione di cavità ritentive e angoli affilati.

10. Mantenere il seguente spessore per questo prodotto per la fabbricazione di protesi:

Collocazione e indicazione	Spessore della parete
Corona o ponte dente frontale	0,8 mm o più
Faccette	0,4 mm o più*
Corona o ponte dente laterale	1,0 mm o più
Inlay dente onlay	1,0 mm o più

* 0,4 mm o più di questo prodotto è lo spessore per faccette interamente in ossido di zirconio. Mantenere uno spessore di 0,8 mm o più se il prodotto viene usato in combinazione con la porcellana.

11. Utilizzare le seguenti sezioni per i connettori per la realizzazione di ponti.

Collocazione e indicazione	Sezione per il connettore
Ponti dente frontali a 2 o 3 elementi	12 mm ² o più
Ponti dente laterale a 2 o 3 elementi	16 mm ² o più

Precauzioni legate all'utilizzo:

- Usare il disco subito dopo averlo estratto dalla sua confezione.

- Non usare il disco se è stata riscontrata una crepa dopo averlo estratto dalla sua confezione.

- Si raccomanda la fresatura a secco. In caso di uso della fresatura a umido, è possibile una riduzione della traslucenza del disco.

- Non usare se viene riscontrata una rottura nei restauri.

- Le raccomandazioni di sinterizzazione sopra esposte rappresentano unicamente una guida orientativa; possono essere necessari aggiustamenti in base ad ogni singolo forno.

Conservazione:

- Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole.

- Il prodotto deve essere conservato a 10-30 °C (50-86 °F).

- Non rimuovere il disco dalla sua confezione durante la conservazione.

- Le raccomandazioni di sinterizzazione sopra esposte rappresentano unicamente una guida orientativa; possono essere necessari aggiustamenti in base ad ogni singolo forno.

Conservazione:

- Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole.

- Il prodotto deve essere conservato a 10-30 °C (50-86 °F).

- Non rimuovere il disco dalla sua confezione durante la conservazione.

- Le raccomandazioni di sinterizzazione sopra esposte rappresentano unicamente una guida orientativa; possono essere necessari aggiustamenti in base ad ogni singolo forno.

[GARANZIA]

Kurary Noritake Dental Inc. sostituirà qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso. Kurary Noritake Dental Inc. non si assume alcuna responsabilità per perdita o danni diretti, conseguenti o particolari, causati dall'applicazione, dall'utilizzo o dall'incapacità a utilizzare questi prodotti. Prima di utilizzare i prodotti, l'operatore deve verificare che gli stessi siano adatti all'uso che si intende fare, assumendosi tutti i rischi e le responsabilità che ne conseguono.

[NOTA]

"KATANA" è un marchio di NORITAKE CO., LIMITED.

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

I. Inleiding

KATANA Zirconia is verkrijgbaar in 2 vormen: Block en Disc. Deze IFU geldt voor KATANA Zirconia ST (Super Translucent) & STML (Super Translucent Multi Layered). KATANA Zirconia ST & STML zijn voorgesinterde zircon